
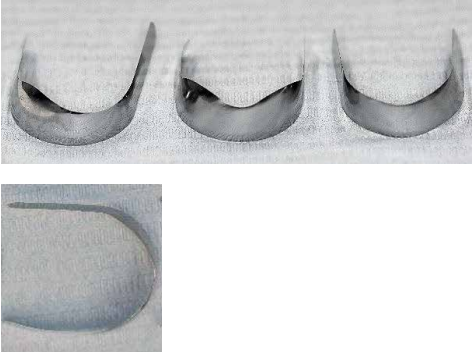
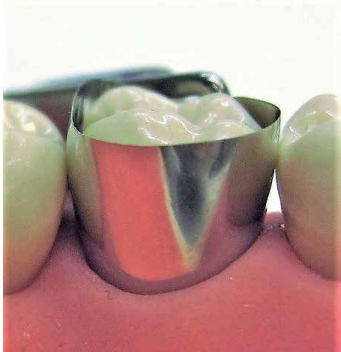
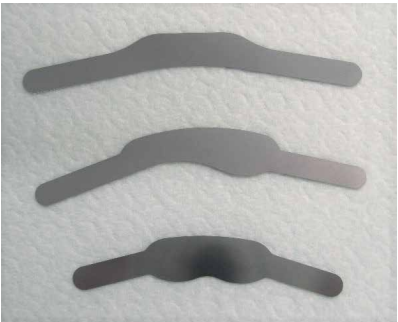
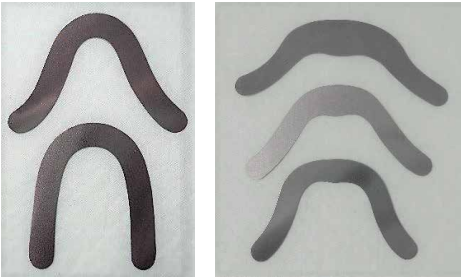


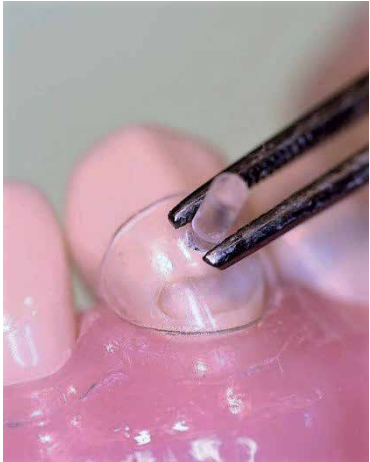

Matriisityyppi ja käyttötarkoitus	Matriisi	Matriisi paikoilleen asennettuna
Sektorimatriisi Yhdistelmämuovilla paikattaessa • Luokan II kaviteetit ja MOD Ensisijainen vaihtoehto yhdistelmämuovikulmätäytteen valmistamisen yhteydessä		
Esimuotoiltu nauhamatriisi Yhdistelmämuovilla paikattaessa • Luokan II kaviteetit ja MOD sekä sitä laajemmat kaviteetit		
Suora nauhamatriisi Väliaikaisia paikkoja yhdistelmämuovista tai lasi-ionomeerista tehtäessä (esim. sokkeli ennen juurihoitoa, pitkäaikaiset väliaikaispaikat) (Amalgaamilla paikattaessa • Luokan II kaviteetit ja MOD sekä sitä laajemmat kaviteetit)		
U-matriisi Yhdistelmämuovilla, lasi-ionomeerilla ja amalgaamilla paikattaessa • Ienrajakaviteetit		

Matriisityyppi ja käyttötarkoitus	Matriisi	Matriisi paikoilleen asennettuna
Kervikaalimatriisi Käytetään yhdessä U-matriisien kanssa tai joissain tapauksissa yksinään Läpinäkyvät, nupilliset • voidaan käyttää valo- tai kemialliskovetteisten materiaalien yhteydessä • nuppi atuloita varten Metalliset foliot • kemialliskovetteisille materiaaleille		
Etualueen esimuotoiltu nauhamatriisi Yhdistelmämuovilla paikattaessa • Luokan III, IV ja V kaviteetit		
Etualueen stripsi Etualueen hampaiden välipintojen paikkauksissa		
Matriiseja maitohampaiden paikkaukseen Automatriisi maitohammasmallille asetettuna Suora välihampaan nauhamatriisi kiristäjässä		